

# INSTRUKCJA UŻYWANIA

## Spray do higieny uszu Cephamed 30 ml

Należy uważnie przeczytać instrukcję używania znajdującą się w opakowaniu, gdyż zawiera ona istotne informacje dla pacjenta o zastosowaniu Spray do higieny uszu Cephamed 30 ml, a następnie przechowywać ją, aby w razie konieczności móc powtórnie ją przeczytać.

**Skład:** oliwa z oliwek, olejek miętowy.

**Dostępne opakowania:** 30 ml

### Czym jest Spray do higieny uszu Cephamed 30 ml i w jakim celu się go stosuje:

Spray do higieny uszu Cephamed 30 ml to skuteczny i bezpieczny spray do uszu, który w naturalny sposób rozpuszcza i usuwa zalegającą woskowinę. Dodatkowo nawilża kanał słuchowy, utrzymując w ten sposób jego prawidłową higienę. Czysty i odpowiednio nawilżony przewód słuchowy zapobiega gromadzeniu się woskowiny co przeciwdziała skutkom jej zalegania (m.in. stanom zapalnym). Dodatkowo zawarty w wyrobie medycznym **Spray do higieny uszu Cephamed 30 ml** olejek miętowy zapewni świeży zapach preparatu.

### Wskazania do zastosowania:

- rozpuszczanie i usuwanie złożeń woskowiny usznej,
- nawilżanie błon śluzowych zewnętrznych przewodów słuchowych,
- zachowanie higieny uszu u osób noszących aparaty słuchowe, jak również u osób z nadprodukcją woskowiny,
- eliminacja zalegania wody w kanale ucha u osób uprawiających sporty wodne oraz kąpiących się.

### Przeciwwskazania:

Nie stosować u osób z perforacją błony bębenkowej.

Nie stosować u osób uczulonych na składniki preparatu.

Nie stosować do oczu, nosa lub jamy ustnej.

U niemowląt i małych dzieci stosować po konsultacji z lekarzem.

Nie stosować u wcześniaków.

### Sposób użycia:



Przed pierwszym użyciem opakowania **Spray do higieny uszu Cephamed 30 ml** należy wstrząsnąć buteleczkę, a następnie wprowadzić w pionowej pozycji aplikator do zewnętrznego przewodu słuchowego i nacisnąć kilka razy, aż pojawi się płyn (Rys. 1). Zaaplikować odpowiednią dawkę wyrobu 1-2 naciśnięciami i delikatnie rozmasować zewnętrzną część ucha (Rys. 2). Powtórzyc tę samą czynność w drugim uchu.

Forma sprayu zapewnia równomierne rozpylenie i precyzyjne dawkowanie.

Po użyciu wyrobu końcówkę aplikatora należy umyć pod bieżącą wodą.

Ze względów higienicznych zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę.

W celu zachowania właściwości wyrobu nie należy manipulować aplikatorem.

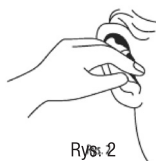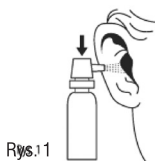

Nie należy stosować wyrobu po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Należy użyć w ciągu 6 miesięcy od pierwszego użycia.

**Przechowywanie:**

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pozycji pionowej w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu. Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

**GLOBAL PHARMA CM S.A.**

ul. Berezów 49A, 26-130 Suchedniów

**Dystrybutor:**

Admira Sp. z o.o.  
ul. Gdańska 91/93  
90-613 Łódź



WYRÓB MEDYCZNY



Data opracowania instrukcji używania: wrzesień 2020